

# Anleitung Schritt für Schritt

HB 142 / HB 342 / ERY 142 / HCT 142




**1.** Kapillare mit der Blutprobe in die geöffnete Küvette stellen




**2.** Blut mit Mikropipetter ausstoßen




**3.** Verschlusskappe wieder aufschrauben  
Küvette mehrmals über Kopf schwenken  
3 Minuten warten  
HB 342: 30 Sekunden warten

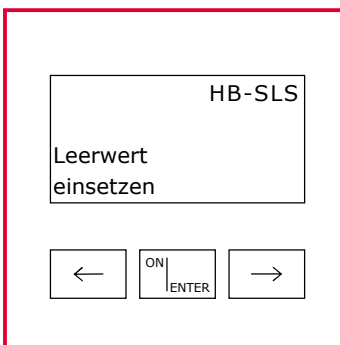


**4.** Gerät mit ON/ENTER einschalten  
Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen  
Gewünschten Test auswählen, mit ON/ENTER bestätigen

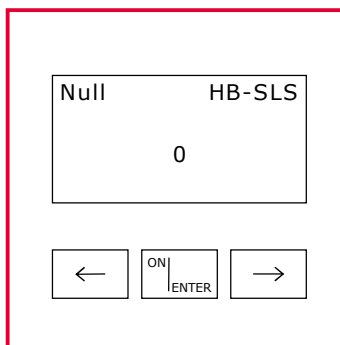

**5.** Nullpunkteinstellung: Unbearbeitete Küvette aus der Packung nehmen und in das Photometer stellen  
Nullpunkt wird vom Gerät gespeichert

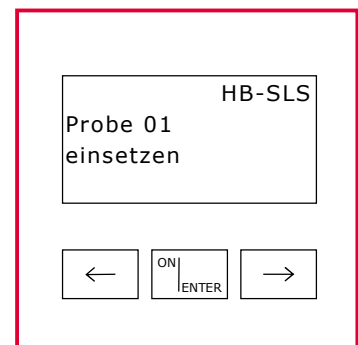

**6.** Nach Signalton Küvette entfernen

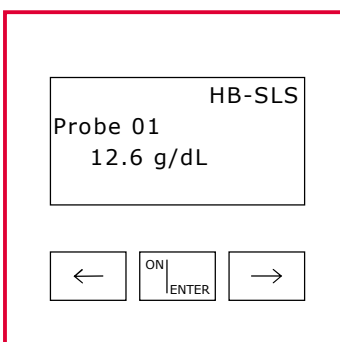

**7.** Küvette mit Blutprobe (Bild 3) in das Photometer stellen  
Messwert ablesen



**Hinweis zur Serienmessung**  
Nach der Nullpunkteinstellung können beliebig viele weitere Proben gemessen werden