



Anleitung Schritt für Schritt


HSR 342

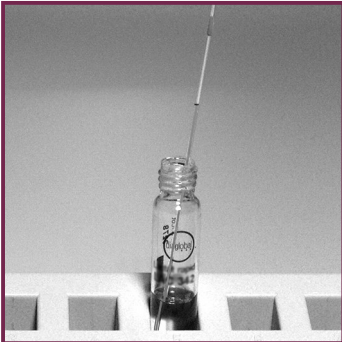

1. 100 µL Serum/Plasma in eine Küvette überführen

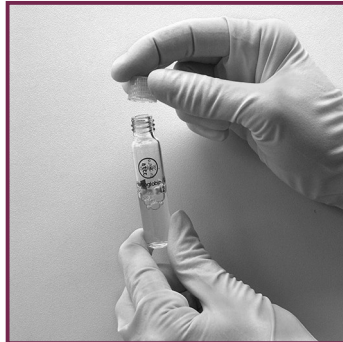


2. Eine Startkappe aus der PE-Flasche aufschrauben

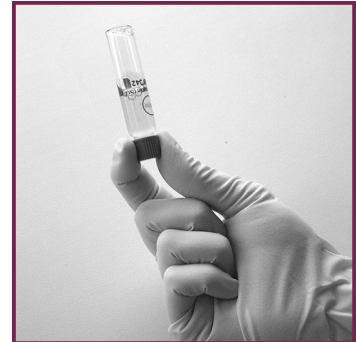


3. Küvette mehrmals über Kopf schwenken




4. Küvette 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen

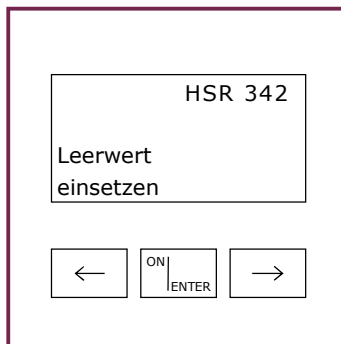

5. Gerät mit ON/ENTER einschalten
Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen
HSR 342 auswählen, mit ON/ENTER bestätigen

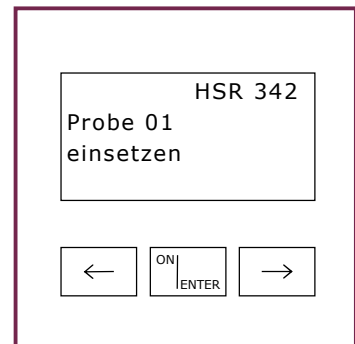

6. Nullpunkteinstellung: Unbearbeitete Küvette aus der Packung nehmen und in das Photometer stellen
Nach Signalton Küvette entfernen

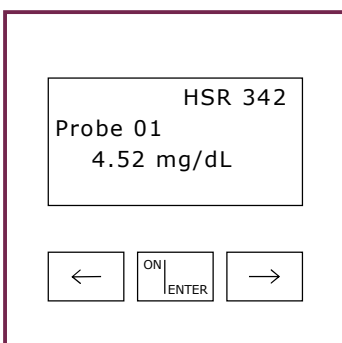

7. Nach Ablauf der 10 Minuten Wartezeit Küvette (Bild 3) ins Gerät einsetzen
Messwert ablesen



Hinweis zur Serienmessung

Nach der Nullpunkteinstellung können beliebig viele weitere Proben gemessen werden